

REJUVENECER DE FORMA
natural y segura

DOROTHY

Dewy



3 JERINGAS
de 3ml./ud.



DOSIER TÉCNICO



3 JERINGAS DE
3ml./ud.
Aguja no incluida

CONCENTRACIÓN
15mg./ml.

G' ELASTICIDAD
0,1 cP

G'' VISCOSIDAD
1,5 cP

DERMIS SUPERFICIAL

SIN LIDOCAÍNA

Ácido hialurónico reticulado de alta calidad

con un peso molecular medio
de 700 kDa. y un tamaño de
partícula <100 μm .

Duración aprox. 6 meses.

DOROTHY **D**

INDICACIONES

- ✔ **Rejuvenecimiento** cutáneo facial, especialmente en mujeres peri y postmenopáusicas.
- ✔ **Hidratación** dermoepidérmica.
- ✔ **Redensificación** de la piel.
- ✔ Mejoría en **tersura y luminosidad**.
- ✔ **Prevención** y tratamiento de signos de fotoenvejecimiento cutáneo.
- ✔ **Recuperación** de la piel dañada.
- ✔ Indicación en **pieles delicadas**, finas y con signos de fotoenvejecimiento leve-moderado.
- ✔ Tratamiento de **arrugas finas**.



Dewy

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Mesoterapia

Microneedling

Cánula

Nappage

Bolus

*Inyección
intradérmica*

MENOPAUSIA

DOROTHY **D** está especialmente indicado para tratamientos en mujeres peri y postmenopáusicas que presentan una disminución rápida del nivel de estrógenos y de sus receptores corporales mucho más evidente a nivel facial.


Signos cutáneos a nivel facial:

Funcionales

- | | |
|---|--|
| ↓ | ↑ |
| <ul style="list-style-type: none"> · Sebo cutáneo · Sudoración · Temperatura frente-mejillas | <ul style="list-style-type: none"> · Agua en córnea · Permeabilidad · Reactividad vascular · Pigmentación por UV |

Morfológicos

- | | |
|--|---|
| ↓ | ↑ |
| <ul style="list-style-type: none"> · Grosor epidérmico · Tasa colágeno dérmico · Densidad folículos pilosos | <ul style="list-style-type: none"> · Arrugas · Atrofia · Telangiectasias |

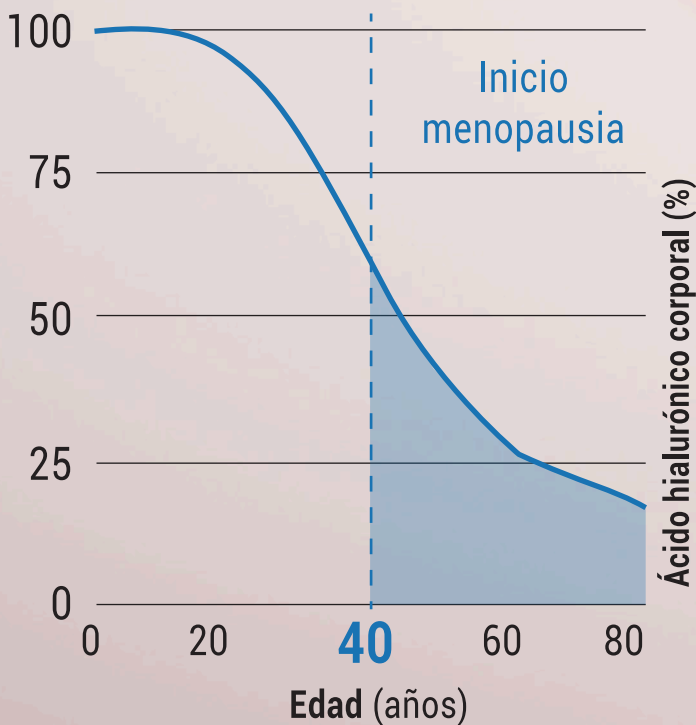

Edad media de aparición
50 años

1/3 de la vida media de
una mujer

> 1000 millones de
mujeres en el mundo

IFRHA*

Isovolumetric Facial Replacement of Hyaluronic Acid
(*Reposición Facial Isovolumétrica de Ácido Hialurónico*)

Metodología desarrollada por THR Medical Products by Dr J.R. VÁZQUEZ

- Inyección en dermis superficial 1mm. - 3mm.
- Utilización cánula 25 - 23 G x 50mm.
- Técnica de inyección en retrotrazado en abanico.
- Ángulo de inyección 15°.
- Depósito de producto por retrotrazado 0,05ml. (1 jeringa).
- En primera sesión según deterioro cutáneo 0,1ml. (2 jeringas).
- Tratamiento inicial 2 sesiones con intervalo de un mes, posteriormente sesiones cada 4 - 6 meses.



1ª sesión : 2 jeringas de 3ml



2ª sesión : 1 jeringa de 3ml

**Reposición masiva de ácido hialurónico*

CONCEPTO IFRHA

Reposición dérmica
de altas dosis de
ácido hialurónico.

Reparación,
regeneración y
revitalización cutánea.

Recuperación
de turgencia, grosor
y brillo de la piel.

Alta duración
de efectos clínicos.





DOROTHY **D**

THR MEDICAL
PRODUCTS

C/ Periodista Badía 13, nave
46134 Foios, Valencia (España)
T +34 960 077 777 · info@thrmedicalproducts.com
www.thrmedicalproducts.com

CONTRAINDICACIONES: No debe ser inyectado en pacientes con hipersensibilidad a algunos de los componentes del producto. No use Dorothy en un área donde la seguridad y eficacia clínica no haya sido evaluada. No use en combinación con otros productos sanitarios no normalizados o no autorizados. No inyecte en las áreas alrededor de los ojos, ni en vasos sanguíneos, ni en pacientes con tendencia a desarrollar cicatrices hipertróficas, historia de enfermedades estreptocócicas o de alergia grave o anafilaxia, o con problemas de coagulación. No debe inyectarse en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni en menores de edad. **EFFECTOS ADVERSOS:** Pueden aparecer las siguientes reacciones adversas después de la inyección de Dorothy inmediatamente o después de cierto periodo de tiempo: reacción inflamatoria que se puede mantener durante una semana, absceso y reacción de hipersensibilidad.